

患者様用取扱説明書

## 巻き爪プロテクター

ご使用に際しては、本取扱説明書を良くお読みください。

### 【操作方法又は使用方法】

- ① 本品の爪挿入口（爪とらえ口）を、巻き爪になっている爪の中央部付近に装着してください。挿入した箇所が爪のなかの爪床（肉部）を圧迫していないかご確認ください。（爪の伸びている部分が2 mm 以上ない場合は使用しないでください。）
- ② 中央部付近から『患部近く』に移動させてください。本品の「爪とらえ口」に爪先をきちんと入れてください。
- ③ 被覆してある両側のセパレーターのうち、片側のセパレーターをはぎ、巻き爪プロテクターの平板部を爪甲部にゆっくり押し当てて貼り付け、他方のセパレーターもはぎ、指本体に巻きつけてきちんと固定するように貼り付けて、ぐらつきがないか確認してください。巻き爪プロテクターが陥入した爪先を炎症部から持ち上げて痛みを和らぎます。

※ 巻き爪プロテクターは「テコの原理」を応用した医療機器です。

個人差にもよりますが、成人で爪は、1日約0.07mm伸びます。2，3日間は貼ったままでお願いします。傷口が塞がれば再陥入することはありません。

### 【使用上の注意】

本品のご使用により、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は、直ちにご使用を中止され、主治医の受診をお受けください。

### 【保管方法及び使用期間】

直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。  
包装が開封・破損されない限り滅菌状態を保ちます。

経過観察をしますので、2，3日後の受診をお願いします。

年 月 日

医療機関名称

主治医